



Pakning af blod- og urinprøver til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

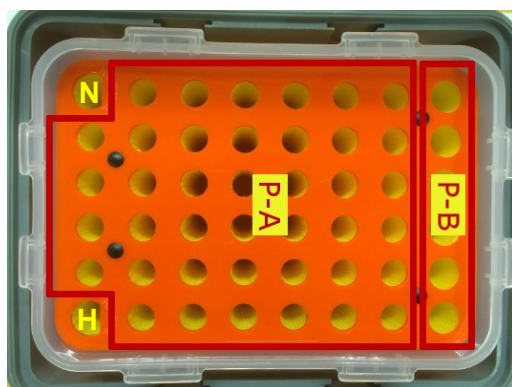

Normal position, N
= kassen indeholder ikke fremskyndede prøver



Haste-position, H
= kassen indeholder fremskyndede prøver

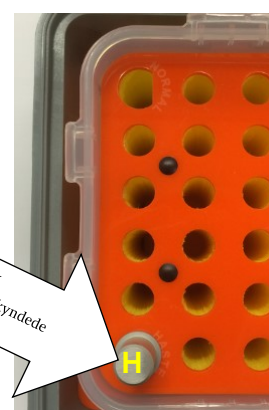

Transportkasse med grønne hjørner

Kassen har to områder til prøverør: P-A og P-B.

Centrifugerede, ikke-centrifugerede prøver og urinprøver sættes samlet i kassen (ingen ordnet rækkefølge).

Der må ikke ligge løse prøverør i transportkassen – alle prøverør *skal* være placeret i hullerne.

Område P-A: kun til prøverør på 2-6 ml – det er de mest almindelige.

Område P-B: kun til store prøverør på 8-9 ml

Bemærk: De almindelige prøverør ikke må sættes i området P-B.

N og H: I venstre side af kassen er der huller til en magnetisk hasteprobeindikator. Øverst er Normal-positionen (N) og nederst Hastepositionen (H).

Bemærk: Hullerne N og H må ikke bruges til prøverør.

Inderkasse: kan tages op og placeres i termoskab.

Tag ikke proppen af prøverørerne ved udligning af vakuum

Proppen på urin- og blodprøverør må ikke have været taget af og påsat igen. Det skyldes bl.a. at prøverne hænger i proppen nede i transportkassen. Hvis låget har været af, kan det glide af i forbindelse med den maskinelle udpakning af kassen. Derfor:

- Fyld urinprøverør ved opsugning via vakuum.
- Vacuum skal udlignes ved hjælp af en kanyler, hvis det ikke var muligt at fylde blodprøverøret korrekt. Proppen må **ALDRIG** tages af glasset.

Spørgsmål: Kontakt laboratoriekonsulenterne på telefon 48 29 22 00.

Læs mere om afhentning af prøver i NORD på www.regionh.dk/laboratorietjening